

medi SLK 90

Schulterluxations-Kissen
Shoulder abduction pillow
Orthèse d'abduction de l'épaule
Cojín para abducción del hombro

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi. Instrucciones de uso.
Instruções para aplicação. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning.
Bruksanvisning. Návod k použití. Uputa za uporabu. Инструкция по использованию.
Kullanma kılavuzu. Instrukcja zakładania. Οδηγία εφαρμογής.



1



2



3



4

medi SLK 90

Назначение

medi SLK 90 представляет собой подушку для поддержки плеча. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения плеча; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания

- Послеоперационная иммобилизация плеча после задней стабилизации
- Послеоперационная иммобилизация при разносторонней нестабильности
- Консервативное лечение травматического заднего вывиха плеча
- Иммобилизация при двусторонней передней и задней нестабильности плеча
- Иммобилизация после удаления передней капсулы плечевого сустава
- Консервативное лечение неосложненных переломов большого бугра плечевой кости
- Транспозиция широчайшей мышцы спины

Противопоказания

- Привычный задний вывих плеча
- Нестабильность плеча при болезни Паркинсона

Рекомендации по надеванию

- Расстегните ремень для талии с помощью красной пряжки, расположенной около подушки. Расположите подушку над подвздошной костью с пораженной стороны.
- Оберните ремень вокруг талии и закрепите его на подушке. Отрегулируйте длину ремня так, чтобы обеспечить оптимальное прилегание подушки к талии.

- Расстегните черную пряжку на передней части подушки и отведите передний ремень за спину. Расстегните ленты на поддерживающей повязке и поместите свою руку в повязку, при этом Ваш локоть должен располагаться в самом углу поддерживающей повязки. Положите кисть руки на шар. Застегните поддерживающую повязку с помощью застежек-липучек.
- Перекиньте плечевой ремень со спины через здоровое плечо вперед. Теперь проденьте руку в петлю, как будто Вы надеваете пиджак.
- Закрепите плечевой ремень с помощью черной пряжки на передней части подушки. Отрегулируйте длину плечевого ремня. Проверьте, чтобы ремень был натянут, но не врезался в кожу под рукой. Если ремень слишком длинный, Вы можете расстегнуть Y-образную застежку-липучку, обрезать ремень ножницами до нужной длины и снова застегнуть Y-образную застежку-липучку.

Рекомендации по уходу

Не носить изделие в воде. Перед стиркой застегните застежки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

пенополиуретан, полиамид

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!