


medi ROM Walker/ medi Walker boot

Unterschenkelorthese
Lower leg orthosis
Orthèse de la jambe
Ortesis de miembro inferior

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi. Instrucciones de uso. Instruções para aplicação. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning. Bruksanvisning. Návod k použití. Uputa za uporabu. Инструкция по использованию. Kullanna kılavuzu. Instrukcja zakładania. Οδηγία εφαρμογής. Használati útmutató. Uputstvo za upotrebu. Інструкція з використання



1

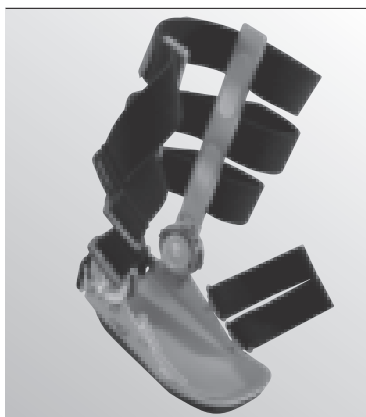

2



3



4



5



6

medi ROM Walker

Назначение

medi ROM Walker / medi Walker boot представляет собой ортез для голени и стопы. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения стопы; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания

- Состояние после операций по поводу повреждений связок, мягких тканей и сухожилий
- Послеоперационное и консервативное лечение переломов малоберцовой кости
- Переломы с вывихом голеностопного сустава
- Консервативное лечение повреждений передних отделов стопы, предплюсны и плюсны
- Состояние после рефиксации связок и повреждений сухожилий малоберцовых мышц
- Реабилитация после переломов таранной, пяточной костей и медиальной лодыжки
- Ранняя функциональная терапия после консервативного или хирургического лечения разрывов ахиллова сухожилия

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

Регулировка подошвенного и тыльного сгибания

Для регулировки диапазона движений расположите отверстие пластиковой крышки шарнира над штифтом.

Нажмите на кнопку и сместите штифт до желаемой величины угла.

Подошвенное сгибание: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°

Тыльное сгибание: 20°, 10°, 0°

Выставленные углы ограничения движения внутреннего и наружного шарниров должны быть одинаковыми.

Информация для специалиста

В случае если сустав необходимо фиксировать в положении, отличном от 0° (например, в положении подошвенного сгибания на 30°), пациенту потребуется дополнительная поддержка при ходьбе. Если пациент предполагает увеличивать нагрузку на стопу, подошвенное сгибание может быть обеспечено путем приподнимания пятки с использованием набора подпяточников, которые приобретаются отдельно. При этом шарнир устанавливается в положение 0°.

Рекомендации по надеванию

- Расстегните все застёжки-липучки и накладки для голени и стопы (A). Поместите стопу в накладки так, чтобы пятка располагалась в специальном углублении, и застегните накладки (B). Если накладки очень длинные и сильно заходят друг на друга, их можно подрезать с помощью ножниц.
- Поместите ногу в жесткую часть изделия. Направляющие стойки должны располагаться точно по середине внутренней и наружной поверхности голени. Зафиксируйте обе ленты на стопе и ленту на пятке (C).
- Зафиксируйте три ленты на голени снизу вверх (D). Проверьте, чтобы ленты лежали на прокладках без перекручивания и были надежно

застегнуты спереди. Помните, что слишком тугое затягивание лент может нарушить кровообращение.

Для дополнительной стабилизации голени вложите пластиковые шины, закрепляемые на внутренней подкладке изделия. Широкая шина предназначена для области икры. Дополнительные подушечки можно использовать для снижения давления (например, на подъеме стопы, в области пяточной ленты, между костями сустава и шарнирным соединением).

Важные замечания

Корректируйте диапазоны сгибания и разгибания только по предписанию Вашего врача.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застёжки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте мягкую подкладку и покрытия предпочтительно с использованием моющего средства medi clean.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

полиамид, пенополиуретан, хлопок

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!